



# KURS MATERIALWART WBK 2022

Sanirucksäcke,  
Rettungstransport, Kursmaterial

Forster Michel, Tico Moreno

# INHALT

## Wartung, Unterhalt & Reparatur

- Sanirucksack Rot / Blau	3-5
- Krankentrage Berger	6
- Rettungsbrett	7
- Rettungstuch/ Bergetuch	8
- Schleifkorbtrage	9
- Spineboard	10

# WARTUNG UND UNTERHALT

## SANIRUCKSACK ROT / BLAU

### Wartung/Unterhalt

1x Jährliche Material Kontrolle durch Materialwart oder San Chef  
ausgenommen Ärzteteil und rote Infusionstasche.

Medizinalsauerstoffflasche haben am Flaschenhals ein  
Ablaufdatum. Die Medizinalsauerstoffflasche kann man bei  
uns im LZB tauschen (**alle 3 Jahre**).

Am Druckreduzierventil mit 1 Abgang im Rucksack Rot, muss  
die Filterschraube alle **2 Jahre** ersetzt werden. Nach **6 Jahren**  
Das komplette Druckreduzierventil

Das Druckreduzierventil mit 2 Abgang im Rucksack Blau, muss alle  
**10 Jahre oder nach Hersteller** ersetzt werden.



# WARTUNG UND UNTERHALT

Die Kontrollliste mit dem kompletten Material ist  
Im abashop unter Rettungsrucksack Blau und Rot  
Zu finden.

1x Jährliche Kontrolle von Ärzteteil inkl. roter Infusionstasche  
durch den Materialsupport LZB. Bitte vorgängig mit dem Materialsupport  
per Telefon oder E-Mail einen Termin abmachen.

**Tel: 044 872 14 30**

**E-Mail: [materialsupport@gvz.ch](mailto:materialsupport@gvz.ch)**



# WARTUNG UND UNTERHALT

## SANIRUCKSACK ROT / BLAU

### Reinigung

Der Rettungsrucksack sollte von Zeit zu Zeit vollständig gereinigt werden.  
Mit einer Handbürste  
Lauwarmem Wasser mit pH neutralen Seife

### Trocknen

Rucksack an einem warmen Ort, über längere Zeit vollständig trocknen lassen, da die Feuchtigkeit ansonsten aufgrund der Beschichtung des Materials nicht entweichen kann.



## WARTUNG UND UNTERHALT

### KRANKENTRAGE BERGER / SCHAUFELTRAGE

#### Wartung/Unterhalt

Periodische, jährliche Kontrolle (**keine Ablegereife**)  
Verschraubung kontrollieren, wenn nötig nachziehen  
(nur selbstsichernde Muttern verwenden)  
Nähte und Gurte auf Risse kontrollieren  
Bewegliche Teile schmieren / Ölen

#### Reinigung

Mit Wasser, Bürste und Schwamm

#### Lagerung

Trocken und Sauber (Schimmelgefahr)  
Gut durchlüftet



# WARTUNG UND UNTERHALT

## RETTUNGSBRETT

### Wartung/Unterhalt

Periodische, Jährliche Kontrolle (**keine Ablegereife**)  
Bänderungen kontrollieren auf Risse  
Metallrahmen kontrollieren auf Risse / Rost  
Verschraubung kontrollieren, wenn nötig nachziehen  
(nur selbstsichernde Muttern verwenden)  
Holzbrett Zustand kontrollieren auf Risse, Schimmel



### Reinigung

Mit Wasser, Bürste und Schwamm

### Lagerung

Trocken und Sauber (Schimmelgefahr)  
Gut durchlüftet  
Bänderungen muss um Rettungsschlittenrahmen aussen herum geführt werden

# WARTUNG UND UNTERHALT

## RETTUNGSTUCH / BERGETUCH

### Wartung/Unterhalt

Periodische, Jährliche Kontrolle (**Ablegereife nach 10 Jahren**)

Schlaufen kontrollieren auf Risse

Nähte auf Risse kontrollieren

Rettungstuch auf Löcher und Risse kontrollieren


### Reinigung

Mit Wasser, Bürste und Schwamm

### Lagerung

Trocken und Sauber (Schimmelgefahr)

Gut durchlüftet

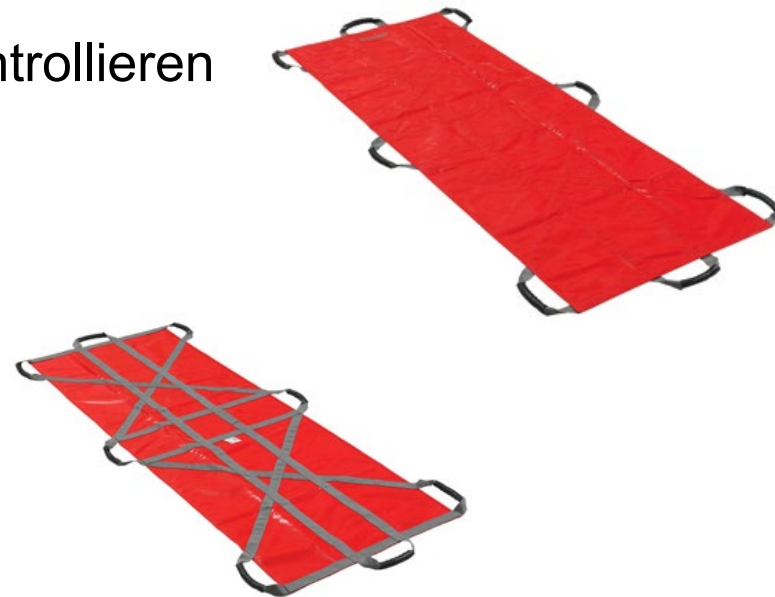



# WARTUNG UND UNTERHALT

## SCHLEIFKORBTRAGE

### Wartung/Unterhalt

Periodische, Jährliche Kontrolle (**Ablegereife nach 12 Jahren**)

Rahmen auf Knicke, Verformungen und Risse kontrollieren

Kunststoffwanne auf Risse, Materialausbrüche und Weisslich-helle

Kunststoffbruchstellen kontrollieren

Drucktasten und Schössern auf gängige Funktion kontrollieren

Nähte und Gurte auf Risse kontrollieren

### Reinigung

Mit Wasser und pH neutralen Seife , Bürste und Schwamm

### Lagerung

Trocken, Sauber (Schimmelgefahr) und vor UV Strahlen schützen



# WARTUNG UND UNTERHALT

## SPINEBOARD

### Wartung/Unterhalt

Periodische, Jährliche Kontrolle (**Ablegereife nach 10 Jahren**)  
Material auf Risse, Weisslich-helle Kunststoffbruchstellen kontrollieren  
Nähte und Gurte auf Risse kontrollieren  
Gurtverschlüsse auf Gängigkeit und Verschlussfestigkeit kontrollieren

### Reinigung

Mit Wasser und pH neutralen Seife , Bürste und Schwamm

### Lagerung

Trocken, Sauber (Schimmelgefahr) und vor UV Strahlen schützen



## KONTAKT

**Forster Michel,**  
**Tico Moreno**  
Weiterbildung Materialwart

Fachausbildner

Tel: 044 872 14 34  
[Michel.forster@gvz.ch](mailto:Michel.forster@gvz.ch)

Tel: 044 872 14 32  
[Moreno.tico@gvz.ch](mailto:Moreno.tico@gvz.ch)

Gebäudeversicherung  
Kanton Zürich  
Thurgauerstrasse 56  
8050 Zürich

T 044 308 21 11  
F 044 303 11 20  
[www.gvz.ch](http://www.gvz.ch)  
[info@gvz.ch](mailto:info@gvz.ch)

Materialsupport LZB  
T 044 872 14 30  
Notfall T 044 872 14 44  
[Materialsupport@gvz.ch](mailto:Materialsupport@gvz.ch)



**BESTEN DANK  
FÜR IHRE  
AUFMERKSAMKEIT!**